

# Protocolo de aseo diario (PAD) HOSPITAL

HARTMANN

Going further  
for health


## MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO

### Check-list

1 pack de 8 manoplas MoliCare® Skin

3 pares de guantes de exploración

Solución hidroalcohólica

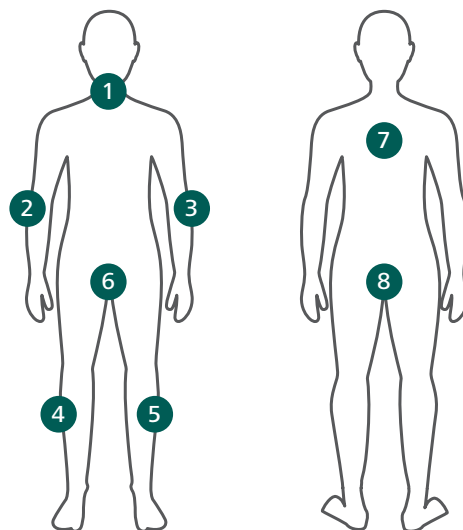

0

Realizar la higiene de manos y colocar guantes.

1

#### Manopla para cara y dorso

Colocaremos la manopla encima del guante. **Orden del aseo:** Cara, cuello, hombros, tórax (y mamas), y abdomen.

2 3

#### Manopla brazo derecho

#### Manopla brazo izquierdo

**Orden del aseo:** Brazos, Manos y Axilas. Usaremos una manopla para cada extremidad. Pondremos especial cuidado de no tocar la vía de la venoclisis. En el momento de limpiar las manos, pondremos especial cuidado en la zona de dedos y uñas para hidratarlas en profundidad.

4 5

#### Manopla pierna derecha

#### Manopla pierna izquierda

**Orden del aseo:** Piernas y Pies. Usaremos una manopla para cada extremidad. En el momento de limpiar los pies, haremos una especial dedicación a las uñas para hidratarlas en profundidad. Pondremos especial cuidado en el espacio interdigital para evitar la aparición de micosis producidas por hongos. Quitarse los guantes.

6

#### Manopla zona genital

Haremos la higiene de manos con solución hidroalcohólica. Nos pondremos guantes y la manopla encima. Procedemos a realizar el aseo de la zona genital. Quitarse los guantes.

7

#### Manopla para espalda

Haremos la higiene de manos con solución hidroalcohólica, nos pondremos guantes y la manopla encima. Giramos al paciente y lo colocamos en decúbito lateral y procedemos a realizar el aseo de la espalda.

8

#### Manopla para zona íntima posterior

Haremos el aseo de la zona. Quitarse los guantes y realizar la higiene de manos con solución hidroalcohólica.

Material exclusivo para profesional sanitario.

[www.es.hartmann.info](http://www.es.hartmann.info)



846098(0419)